

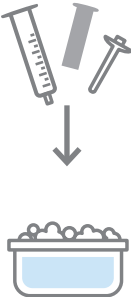

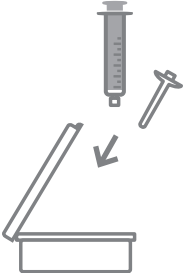



Reinigingsinstructies: spuit en eindstukje

Een goede reiniging na gebruik van de spuit en eindstukje is belangrijk om contaminatie van de medicatie te voorkomen. De volgende informatie is uitsluitend ter advies. Volg altijd de instructies van uw arts of apotheker bij gebruik van dit product. Het reinigen van de spuit en eindstukje is hieronder afgebeeld. Het is niet noodzakelijk om het apart eindstukje te reinigen wanneer dit niet wordt gebruikt voor toediening.

<p>1.</p>  <p>Vul de spuit (met eindstukje erop) met kraantjeswater of afgekoeld gekookt water.</p>	<p>2.</p>  <p>Spoel het water door de spuit (met eindstukje erop). Herhaal 1 tot 3 keer totdat de oorspronkelijke inhoud is verdwenen.</p>	<p>3.</p>  <p>Haal de cilindrische buis, de stamper en het eindstukje uit elkaar. Reinig deze onderdelen in warm water met zeep.</p>	<p>4.</p>  <p>Spoel de onderdelen met koud kraantjeswater en droog alles met een papieren doek.</p>	<p>5.</p>  <p>Monteer de cilindrische buis en de stamper opnieuw. Bewaar de spuit (en het apart eindstukje) in een nette, droge ruimte.</p>	<p>6.</p>  <p>max. 7 DAYS</p> <p>Gooi de spuit (en het eindstukje) weg na een maximum van 7 dagen na het eerste gebruik.</p> <p>De spuit moet ook weggegooid worden indien de stamper zeer stroef beweegt of indien de gegradeerde markeringen onleesbaar worden.</p>
--	---	---	---	--	---