

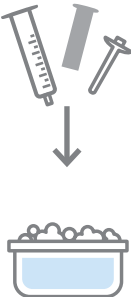

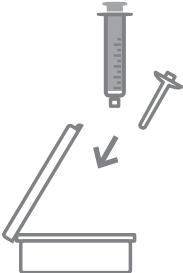



Rengøringsanvisning: oral suspension sprøjte og forlængestykke

God rengøring af sprøjten og forlængestykket efter brug er vigtigt for at forhindre forurening af medicinen. Følgende information er kun rådgivning. Følg altid instruktionerne fra din læge eller apotek når du bruger dette produkt. Rengøring af sprøjten og forlængestykket er afbilledet nedenfor. Det er ikke nødvendigt at rengøre forlængestykket når det ikke anvendes.

<p>1.</p>  <p>Fyld sprøjten (med forlængestykket) med vand fra hanen eller afkølet kogt vand.</p>	<p>2.</p>  <p>Skyl sprøjten (med forlængestykket). Gentag 1-3 gange indtil sprøjten og forlængestykket indhold er blevet ryddet.</p>	<p>3.</p>  <p>Adskil sprøjten og og stempel (og forlængestykket). Rengør sprøjten, stemplet (og forlængestykket) i varmt vand med sæbe.</p>	<p>4.</p>  <p>Skyl sprøjteløbet, stemplet (og forlængestykket) med koldt vand fra hanen og tør alt med et stykke køkkenrulle.</p>	<p>5.</p>  <p>Saml sprøjten og stemplet. Opbevar sprøjten (og forlængestykket) i et rent, tørt område.</p>	<p>6.</p> <p>max.</p>  <p>7 DAYS</p> <p>Kassér sprøjten (og forlængestykket) efter maximal 7 dage fra første anvendelse.</p> <p>Sprøjten bør også kasseres, hvis stemplet bliver stift og ubevægelig i sprøjten eller hvis doseringsmarkering blive ulæselig.</p>
--	---	--	---	---	--