

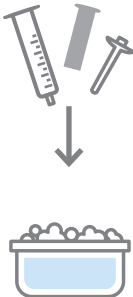

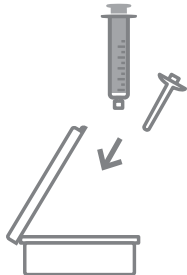



# Instructions de nettoyage: seringue et rallonge

Il est important de nettoyer correctement la seringue et sa rallonge après chaque utilisation afin de prévenir les risques de contaminations du médicament. Les informations suivantes sont présentées uniquement à des fins de conseils. Toujours suivre les instructions de votre docteur ou pharmacien quand vous utilisez ce produit. Le nettoyage de la seringue et de sa rallonge est décrit ci-dessous. Il n'est pas nécessaire de nettoyer la seringue et sa rallonge quand elle n'est pas utilisée pour l'administration.

<p>1.</p>  <p>Remplir la seringue (et sa rallonge) avec de l'eau du robinet (ou de l'eau purifiée).</p>	<p>2.</p>  <p>Vider la seringue (et sa rallonge). Répéter l'opération 1 à 3 fois jusqu'à ce que le contenu original ait bien été vidangé.</p>	<p>3.</p>  <p>Séparer le corps de la seringue du piston (et sa rallonge). Nettoyer la seringue, le piston (et sa rallonge) à l'eau chaude et au savon.</p>	<p>4.</p>  <p>Rincer le corps de la seringue, le piston (et sa rallonge) à l'eau, et sécher le tout avec du papier absorbant.</p>	<p>5.</p>  <p>Rassembler le corps de la seringue et le piston. Ranger la seringue (et sa rallonge) dans un endroit propre et sec.</p>	<p>6.</p> <p>max.</p>  <p>7 JOURS</p> <p>Changer la seringue (et sa rallonge) au maximum 7 jours après la première utilisation.</p> <p>La seringue devrait être changée si le mouvement du piston devenait difficile dans le corps de la seringue ou si les graduations devenaient illisibles.</p>
--	--	---	---	--	---