

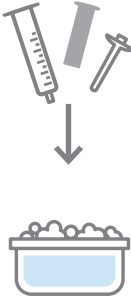

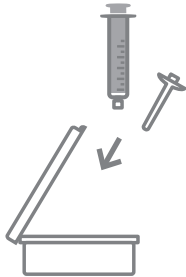



# Schoonmaakinstructie: doseerspuit en verlengstuk

Het is van belang dat de doseerspuit en het verlengstuk na gebruik goed worden schoongemaakt. Volg bij het gebruik van uw medicatie altijd het advies van uw arts of apotheker. In onderstaand stappenplan staat beschreven hoe de doseerspuit en het verlengstuk schoongemaakt dienen te worden. Wanneer het verlengstuk niet wordt gebruikt hoeft deze niet schoongemaakt te worden.

|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| <p>1.</p>  <p>Vul de doseerspuit (met het verlengstuk) met kraanwater.</p> | <p>2.</p>  <p>Spoel de doseerspuit (met het verlengstuk) door. Herhaal dit 1-3 keer totdat de doseerspuit schoon is.</p> | <p>3.</p>  <p>Haal de doseerspuit uit elkaar (met het verlengstuk). Maak de verschillende onderdelen schoon in warm water met afwasmiddel.</p> | <p>4.</p>  <p>Spoel de onderdelen af met koud water en droog ze af met keukenpapier.</p> | <p>5.</p>  <p>Zet de doseerspuit weer in elkaar en bewaar deze en het verlengstuk op een schone en droge plek.</p> | <p>6.</p>  <p>Vervang de doseerspuit (en het verlengstuk) na maximaal 7 dagen gebruik.</p> <p>Vervang de doseerspuit ook indien deze hapert en/of wanneer het volume slecht af te lezen is.</p> |
|---|---|---|--|---|--|