

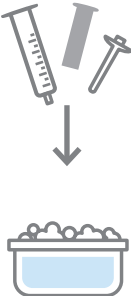

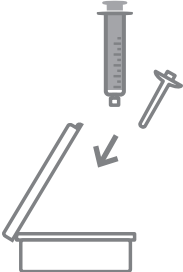



Instrukce pro čištění: dávkovací stříkačka a nástavec

Důkladným omytím dávkovacího zařízení po použití můžete předejít kontaminaci léčivého přípravku. Následující informace jsou pouhým doporučením pro správné zacházení s dávkovacím zařízením. Vždy se řiďte doporučeními vašeho lékárníka nebo lékaře pokud užíváte tento produkt. Správné očištění dávkovacího zařízení je popsáno níže. Není nutné omývat dávkovací zařízení pokud není určeno k podání léčiv.

<p>1.</p>  <p>Naplňte dávkovací stříkačku (s nástavcem je-li součástí balení) čistou vodou nebo vychladlou převařenou vodou.</p>	<p>2.</p>  <p>Vyprázdněte celý obsah stříkačky (s nástavcem je-li součástí balení). Vypláchnutí opakujte 1-3x dokud není původní obsah stříkačky zcela vymyt vodou.</p>	<p>3.</p>  <p>Rozložte stříkačku, posuvný píst (a nástavec) na jednotlivé díly. Umyjte stříkačku, posuvný píst (a nástavec) v teplé vodě za užití šetrného mycího prostředku.</p>	<p>4.</p>  <p>Opláchněte stříkačku, posuvný píst (a nástavec) studenou kohoutkovou vodou a důkladně osušte pomocí papírové utěrky.</p>	<p>5.</p>  <p>Znovu sestavte dávkovací stříkačku a posuvný píst. Skladujte stříkačku (a nástavec) na čistém, suchém místě.</p>	<p>6.</p>  <p>Používejte stříkačku (s nástavcem) maximálně 7 dní od prvního použití. Po uplynutí této doby stříkačku zlikvidujte a pro další užívání použijte novou.</p> <p>Dávkovací stříkačku zlikvidujte také v případě, že se pístem nedá hladce posouvat nebo pokud je odměrná stupnice na stříkačce nečitelná.</p>
---	--	--	--	---	---